



STARLIGHT EXPRESS™

Zum Formen transparenter Knöpfchen & Attachments



PERFORMANCE

Mithilfe dieses kleinen Lichthärte-Stifts sind zahnfarbene Knöpfchen & Attachments schnell und preiswert formbar.



POWER

Der STARLIGHT EXPRESS™ stellt eine effektive 2-in-1-Lösung dar. So sind mit seiner Hilfe sowohl transparente Knöpfchen, als auch Attachments für Aligner formbar.



SPEED

Es braucht nur wenige Sekunden, bis das Knöpfchen ausgehärtet ist. Für eine schnelle und einfache Anwendung des Stifts wird dieser mit Batterien betrieben.



EXTRA-VORTEIL

Der STARLIGHT EXPRESS™ stellt eine äußerst clevere und wirtschaftliche Lösung dar, man kann ihn einfach wie einen Stift in der Brusttasche verstauen. Die Silikonformen passen zudem auf alle gängigen abgewinkelten Lichthärtelampen.



LOVE STORY

Es sind diese kleinen, smarten Helfer, die unseren kieferorthopädischen Alltag wirklich vereinfachen. Formen Sie Ihre eigenen transparenten Knöpfchen direkt am Patientenstuhl – ganz einfach mit Bonding-Material, ohne zusätzliche Kosten.



Courtesy of Elena Moreno, 2019

Former für transparente Knöpfchen und Aligner-Attachments mit Licht-Polymerisation in Stiftgröße

Den vorgeformten Knöpfchenformer-Aufsatz einfach auf die Spitze des STARLIGHT EXPRESS™ oder Ihrer eigenen abgewinkelten Lichthärtelampe aufsetzen. Mithilfe einer Spritze den vorgeformten Hohlraum mit Ihrem lichthärtenden Material bzw. Komposit vollständig füllen.

Den Zahn wie gewohnt anätzen. Anschließend den STARLIGHT EXPRESS™ direkt auf den entsprechenden Zahn aufsetzen, leicht andrücken und je nach verwendetem Komposit/Kunststoff entsprechend der jeweiligen Gebrauchsanweisung aushärten. Ist dieses erfolgt, den STARLIGHT EXPRESS™ vorsichtig durch eine kleine Kippbewegung abziehen. Das zahnfarbene Knöpfchen bzw. Schienen-Attachment ist nun einsatzbereit.

STARLIGHT EXPRESS™	
Lichthärtepen	DP-STARLIGHT
Lichthärtepen 1 x Knöpfchen- Former Silikon 1 x Schienen Attachment- Former Silikon	DP-STARLIGHT +
Lichthärtepen 2 x Schienen Attachment- Former Silikon	DP-STARLIGHT +S
2 x Knöpfchen- Former Silikon	DP-STARLIGHT-K
2 x Schienen Attachment- Former Silikon	DP-STARLIGHT-S
1,5V Batterie AAAA	DP-STARLIGHT-BAT

LICHTHÄRTEPEN
EUR

LICHTHÄRTEPEN Plus
EUR

LICHTHÄRTEPEN Plus 2
EUR

KNÖPFCHENFORMER
EUR

SCHIENEN ATTACHMENT
EUR

BATTERIE
EUR

